



Servizio di sanificazione letti degenza



Servizi e Assistenza

Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) rappresentano una delle principali criticità del sistema sanitario che in Italia colpisce circa il 5-8% dei pazienti ricoverati, causando un prolungamento della degenza e un impatto clinico stimato di circa 11.000 decessi annui. Nei reparti ad alta intensità di cura, il letto rappresenta uno dei principali vettori di contaminazione, le cui superfici come materassi, sponde, maniglie e piani di appoggio possono favorire la trasmissione di microrganismi patogeni resistenti al paziente successivo, tra cui Clostridioides difficile, MRSA e VRE.

UN APPROCCIO STRUTTURATO

Il servizio che proponiamo si basa su un modello adattabile ai diversi contesti assistenziali, operando anche in ambienti sanitari esposti a maggiore criticità, tra cui terapie intensive, sub-intensive, stroke unit, reparti con pazienti immunocompromessi e aree ad alto turnover. Gli interventi vengono modulati in base all'evento: sanificazione ordinaria quotidiana, sanificazione terminale al cambio paziente, sanificazione rinforzata in caso di pazienti infetti o colonizzati e interventi straordinari in presenza di eventi biologici. La sanificazione segue un protocollo rigoroso articolato in più fasi:

01. Rimozione dei materiali monouso
02. Pulizia meccanica
03. Disinfezione al perossido d'idrogeno
04. Ripristino del letto



FASE 01. RIMOZIONE

Il primo step consiste nella rimozione dei materiali monouso e della biancheria, nonché il trasferimento del letto in area dedicata da parte dei nostri operatori e la sostituzione con un letto già sanificato.

FASE 02. PULIZIA

Si procede dunque con una pulizia meccanica completa di tutte le superfici (materasso, struttura, sponde, comandi, maniglie, tavolino, testiera e pediera) mediante detergenti conformi agli standard CAM/ISS.

FASE 03. DISINFEZIONE

Successivamente, il letto viene sottoposto a disinfezione tramite tunnel al perossido d'idrogeno, una tecnologia avanzata che consente di ottenere un'elevata efficacia microbiologica. Al termine del ciclo viene generato un report automatico, valido anche ai fini medico-legali, che certifica l'avvenuta sanificazione alle direzioni sanitarie.

FASE 04. RIPRISTINO

Il processo si completa con la verifica visiva, il ripristino del letto e la registrazione dell'intervento. Ogni attività è tracciata attraverso registri giornalieri, firma degli operatori e supervisione del coordinatore, garantendo un controllo costante e documentato delle operazioni.

RISULTATI ATTESI

Prevenzione delle
ICA

Riduzione tempi
di degenza

Tracciabilità delle
procedure



Servizi e Assistenza

Via Calabria, 7 - Caltanissetta
info@serv-ass.com - www.serv-ass.com